

Generelle Informationen:

Den Bio-Rücken-Sitz gibt es in 3 Ausführungen:

- Sitz S (Micro, 20 x 26 cm bis 28 x 33.5 cm)
- Sitz M (Junior, 32 x 32 cm bis 41 x 38 cm)
- Sitz L (Erwachsen, 40 x 41 cm bis 49 x 48 cm)

Sitzeinstellungen:

Sitzbreite:





Die Sitzbreite wird über die Distanzen zwischen Kleiderschutz links und rechts eingestellt, sowie über die Distanzen zwischen den Armlehnen.

Für die Einstellung der Kleiderschutzdistanz werden die Schrauben an angezeigter Stelle (rechts und links) gelöst und nach der vollzogenen Einstellung wieder festgezogen.

Die Einstellung der Armlehnen-Distanz geschieht anhand der angezeigten Schrauben. Beide Einstellungen können im Prinzip stufenlos eingestellt werden. Für Armlehnen-Sonderdistanzen gibt es verschiedene Verbindungsstangen-Längen. Bei Bedarf können die Stangen-Längen von S, M und L untereinander ausgetauscht werden.

Sitztiefe:


Die 2 Schrauben an der Blech-Oberseite werden entfernt, die 4 an der Seite gelöst, dann kann der Rücken auf die gewünschte Position geschoben werden.

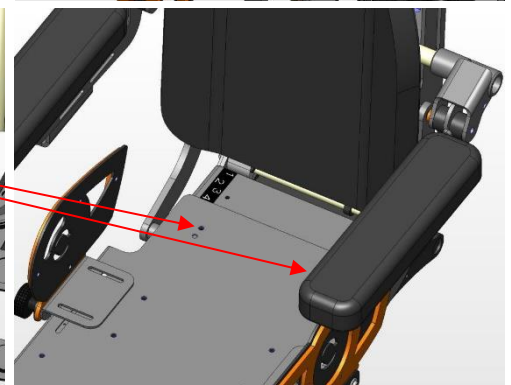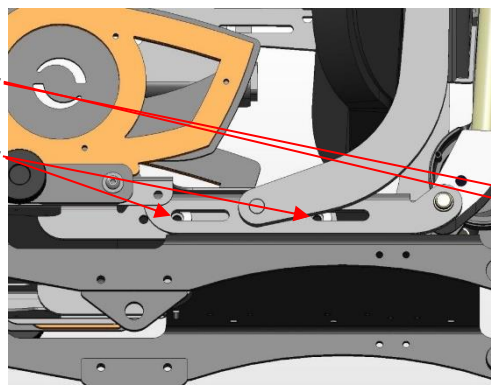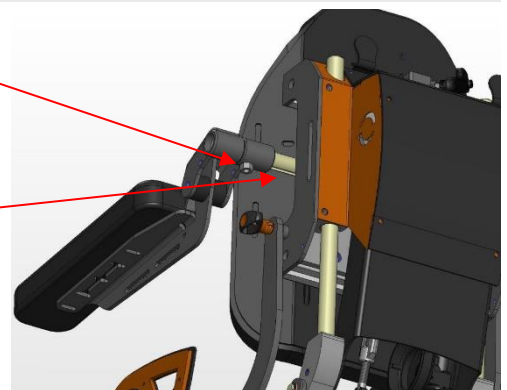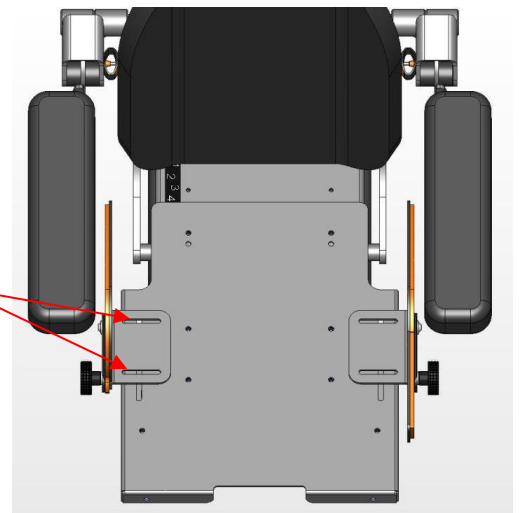

Kurz-Bedienungsanleitung Bio-Rücken-Sitz T4

Folgendes ist zu beachten:

- Für die Sitztiefen-Einstellung ist an der hinteren Seite eine Skala angebracht, deren Nummer auf dem Bestellformular zu finden ist. Damit kann genau die Zahl eingestellt werden, mit der die gewünschte Sitztiefe angegeben ist. (Beispiel auf Bild: Pos. 4 => Sitztiefe Sitz S => 32 cm / Sitz M => 38 cm / Sitz L => 47 cm)
- Bevor die 4 seitlichen Schrauben festgezogen werden, werden die beiden M6-Schrauben von oben wieder angebracht. In jedem 15 mm-Abstand gibt es an einer der beiden angezeigten Positionen eine Anschraub-Möglichkeit.
- Nicht vergessen: Alle Schrauben festziehen!

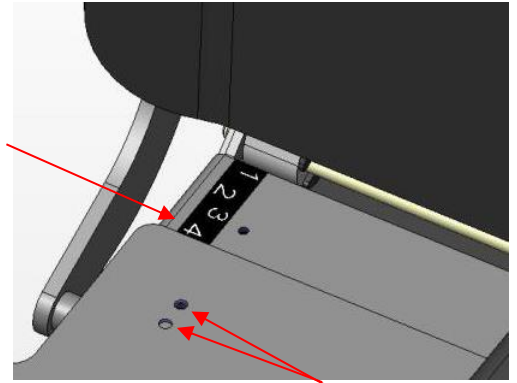

Armlehnenhöhe:

Zur Einstellung der Armlehnenhöhe wird zuerst die Abdeckung anhand der 4 M8-Schrauben entfernt. Die untere Abdeckung wird dann nach hinten wegklappen. (In der Abbildung wird die Abdeckung transparent dargestellt.)

Zwei Schrauben können gelöst und beide Armlehnen innerhalb der Schlitze hoch und runter gestellt werden.

Damit wird natürlich auch der Armlehnen-Winkel verstellt. Dieser kann mit der angezeigten Stellschraube nachkompensiert werden.

Es ist besonders darauf zu achten, dass bei der vordersten Rücken-Neigungs-Einstellung diese Stellschraube nicht zu kurz eingestellt wird. (Siehe Kreis im Bild) Das würde bedeuten, dass der Armlehnen-Winkel zu stark nach oben eingestellt wurde und muss zurückkorrigiert werden, um eine zu grosse mechanische Belastung zu verhindern.

